



CT12 MONOLEVA A CURSORE

La monoleva a cursore CT12 trasferisce al volante i comandi a pedale dell'acceleratore e del freno rendendoli azionabili manualmente. Può essere installata su autoveicoli dotati di cambio automatico e di servosterzo. Permette la guida a conducenti con parziale o totale perdita funzionale agli arti inferiori. La CT12 è costituita da una leva freno a spinta orizzontale e da un cursore: spingendo la leva verso il cruscotto si frena, mentre muovendo il cursore verso l'esterno con il pollice si accelera. La CT12 viene installata sulla colonna di direzione, destra o a sinistra del volante, secondo le esigenze del conducente; il suo posizionamento non ostacola l'apertura dell'airbag, l'accessibilità ai comandi di guida e non limita la guida di chi non la utilizza. Le parti meccaniche del dispositivo sono posizionate all'esterno del cruscotto: per evitare però di essere d'intralcio durante la salita, la discesa dall'auto o il caricamento della carrozzina, vengono fissate il più vicino possibile alla parte inferiore del cruscotto. L'impugnatura è dotata di due pulsanti; uno per l'azionamento del clacson e l'altro per l'utilizzo dell'economizzatore e del blocco freno. A seconda del modello di autovettura su cui verrà installata, la monoleva è disponibile nella versione ad interfaccia o a motore. In entrambi i casi, il dispositivo è dotato di un sistema di sicurezza che interrompe l'accelerazione in caso di frenata.



PARTNER



Kivi S.r.l.

Strada Carmagnola 1
14040 Vigliano d'Asti ITALIA
www.kivi.it
info@kivi.it
TEL +39.0141.951668
FAX +39.0141.953603
facebook.com/Kivisrl
youtube.com/KiviMobilityFreedom